

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 38819001

キタザト EDS カテーテル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状図

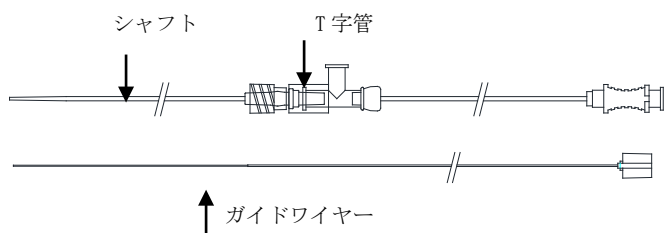

2. 原材料

シャフト	12 ナイロン
------	---------

3. 滅菌方法

放射線滅菌又はエチレンオキサイドガス滅菌

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡治療時に専用の内視鏡とともに使用する器具で、人体の自然開口部を通じて薬用液の送込に用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 使用前点検

- 1) 本品は滅菌済みにつき再使用できない。
- 2) 予め、使用する内視鏡の長さを測定してください。
- 3) 滅菌パックの点検、本品の外観の点検、作動の点検をしてください。異常が認められたときには使用しないでください。

2. 内視鏡への挿入

- 1) 内視鏡チャンネル口に本品カテーテルを挿入します。
- 2) 内視鏡先端部までカテーテルが到達したら、ガイドワイヤーを静かに抜きます。
- 3) 内視鏡に送気装置を取り付ける場合にはT字管を固定してください。
- 4) コネクターにシリンジを取り付け、薬用液を静かに送入します。
- 5) カテーテルを静かに引き抜いてください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用前には必ず添付文書をお読みください。
- 2) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 3) 使用直前に開封してください。
- 4) 滅菌袋が破損しているものや、製品に異常が認められるものに関しては使用しないでください。
- 5) 本品は使用における手技に精通した術者が行ってください。
- 6) 操作においては、無菌的におこない、細菌等に対する予防措置は十分に行ってください。
- 7) 本品に改造を施さないでください。

2. 使用上の重要な注意

- 1) 内視鏡チャンネル径が 1.0mm 以下の場合は使用しないでください。
- 2) 内視鏡のチャンネルに汚れが付着しているとカテーテルの挿入が困難な場合があります。必ず使用前に内視鏡の状態を確認してください。

3. その他の注意

- 1) 本品は放射線滅菌済みです。放射線滅菌による材質の変色は認められるときがありますが、品質には問題ございません。
- 2) 再使用は禁止しております。

* 【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管して下さい。

2. 有効期間・使用の期限

製品ラベルに使用期限を記載されています。ご確認ください。

【包装】

個包装 10 本入／箱

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社北里コーポレーション
〒416-0932 静岡県富士市柳島 100 番地 10
TEL: 0545-65-7122 FAX: 0545-65-7128

製造業者 株式会社北里コーポレーション

【お問い合わせ先】

株式会社北里コーポレーション
TEL: 0120-457-454 (フリーダイヤル)
FAX: 0120-111-471