

機械器具 47 注射針及び穿刺針
一般医療機器 再使用可能な注射用針 30890000

キタザトカテラン針

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止（但し、同一患者においては滅菌後のみ使用することができます。）
- 本品に加工を施さないでください。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状図



2. 原材料

名称	材質
針管	ステンレス

3. 滅菌方法

放射線滅菌又はエチレンオキシドガス滅菌

【使用目的又は効果】

本品は、薬液の注入に用いる注射針である。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前点検

- 滅菌パックの点検、本品の外観の点検をする。異常が認められたときには使用しない。

2. 使用方法

- 穿刺部位には十分な消毒を行ってください。
- 本品を開封後、針先に損傷がないことを確認してください。
- 針基に注射器を接続します。
- 目標部位に薬液を注入後、ゆっくりと注射器を引いて針管を抜去してください。

**【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 使用前には必ず添付文書をお読みください。
- 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 使用直前に開封してください。
- 滅菌袋が破損しているものや、製品に異常が認められるものに関しては使用しないでください。
- 本品は使用における手技に精通した術者が行ってください。
- 本品に改造を施さないでください。

2. 使用上の重要な注意

- 手技終了後、リキャップは行わないでください。
- 誤刺には十分な注意を払い、手技終了後は速やかに破棄をお願いします。
- 本品は同一患者のみ再滅菌して使用可能です。再使用する際は本品の損傷がなく、正常な機能かを点検し、使用に適するかを確認ください。十分に洗浄、消毒、滅菌を行ってください。滅菌は以下の条件を参考に行ってください。

高压蒸気滅菌	121℃, 20 分
乾熱滅菌	180℃, 60 分

滅菌後の使用前に滅菌パックの点検、本品の外観の点検、作動の点検をしてください。異常が認められたときには使用しないでください。

3. その他の注意

- 本品は滅菌済みです。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水濡れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管してください。

2. 有効期間・使用の期限

- 製品ラベルに使用期限を記載されています。ご確認ください。

【包装】

個包装 10 本入／箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社北里コーポレーション
〒416-0932 静岡県富士市柳島 100 番地 10
TEL: 0545-65-7122 FAX: 0545-65-7128

製造業者 株式会社北里コーポレーション

【お問い合わせ先】

株式会社北里コーポレーション
TEL: 0120-457-454 (フリーダイヤル)
FAX: 0120-111-471