

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 婦人科用剥離子 70955000

カービィ カニ्यूレ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 患者及び本品に過剰な力を加えない。予め使用可能かを確認すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状図



先端部開口型や側穴型がある。また子宮頸部の形状に応じて使用しやすいようにカニ्यूレ先端部の形状がストレートもしくはカーブの形状がある。滅菌済みである。

2. 原材料

12 ナイロン

【使用目的又は効果】

本品は、細胞学的診断に供する粘膜細胞組織を子宮から採取するために用いる器具である。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 使用前

- 1) 本品は滅菌済みであり、再使用できません。
- 2) 滅菌パックの点検、本品の外観の点検を実施し、本品及び滅菌パックの損傷がなく、正常な機能、使用に適するかをご確認ください。異常が認められたときには使用しないでください。
- 3) 子宮頸部や子宮内に損傷が認められるときは使用しないでください。

2. 使用時

- 1) 本品カニ्यूレを子宮頸部から静かに挿入してください。
- 2) メモリを確認して子宮頸部もしくは子宮内の目的の位置までカニ्यूレ先端を挿入してください。
- 3) オブチュレーターのハンドルを静かに引いて細胞や組織を吸引してください。
- 4) 吸引した細胞や組織は速やかに病理等の検査へ依頼してください。

3. 使用后

- 1) 医療廃棄物として、感染防止に留意し、適切に処理してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用前には必ず添付文書をお読みください。
- 2) 使用における手技に精通した術者が行ってください。
- 3) 使用に適さない患者には使用しないでください。
- 4) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 5) 使用直前に開封してください。
- 6) 感染等を防止のため、必ず手袋を着用ください。
- 7) 滅菌袋が破損しているものや、本品に異常が認められるものに関しては使用しないでください。
- 8) 操作においては、無菌的に行い、細菌等に対する予防措置は十分に行ってください。
- 9) 改造や無理な使用はしないでください。
- 10) 使用中は患者状態を常に確認し、異常が見られた場合、使用を中止してください。
- 11) 子宮頸部や子宮内に損傷が認められるときは本品を挿入しないでください。

2. 使用上の重要な注意

- 1) 子宮頸部へ挿入が困難な時は無理に挿入をしないでください。出血等の原因となります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管してください。

2. 有効期間・使用の期限

製品ラベルに使用期限を記載されています。ご確認ください。

【包装】

個包装 10 本入／箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社北里コーポレーション

〒416-0932 静岡県富士市柳島 100 番地 10

TEL: 0545-65-7122 FAX: 0545-65-7128

製造業者 株式会社北里コーポレーション

【お問い合わせ先】

株式会社北里コーポレーション

TEL: 0120-457-454 (フリーダイヤル)

FAX: 0120-111-471